



„Living with V-Box.“
Alles drin, alles komplett.

Melio.serv[®] VET

Anleitung zur Abnahme von Proben.

Öffnen Sie zunächst die „V-Box“ und machen Sie sich in Ruhe mit dem Inhalt vertraut.
Alle Schritte der Abnahme sind dort gut erklärt und leicht verständlich.
Für die beschriebenen Schritte planen Sie bitte **ca. 10 Minuten** ein.

Diese Information stellen wir Ihnen hier in unserem WEB-Angebot ergänzend bereit, damit Sie bei Bedarf schnelle Hilfe und Anleitung finden.

- ANLEITUNG -

A



B

Wählen Sie zunächst Ihren gewünschten Modus aus.

A) Speichelprobe: - KOKON -

1. Nehmen Sie die Probenabnahme nicht unmittelbar nach einer Fütterung vor.
2. Wir empfehlen die Verwendung der „Melio.serv V-Box“. Vermeiden Sie jegliche Verunreinigung.
3. Öffnen Sie den versiegelten Kokon mit dem Abstrichtupfer erst unmittelbar vor der Probenabnahme.
4. Führen Sie das wattierte Ende vorsichtig in den Mund des Tieres ein und nehmen Sie Speichel ab. Sie können die Abnahme im gesamten vorderen Maulbereich vornehmen (Zunge, Lefzen, Gaumen).
5. Achten Sie darauf, dass das wattierte Ende gut eingespeichelt ist.
6. Geben Sie die Probe direkt nach der Abnahme in den Kokon zurück. Legen Sie den Abstrichtupfer zuvor nicht ab.
7. Verschließen Sie den Kokon sorgfältig mit dem beprobten Abstrichtupfer. Nachfolgend mit beiliegendem ReSeal versiegeln.
8. Machen Sie die notwendigen Angaben auf den beiliegenden Formularen.
9. Beschriften Sie den Kokon mit: Name des Tieres, Geburtsdatum und Geschlecht des Tieres sowie dem Datum der Probenabnahme.
10. Setzen Sie die Probe weder Sonneneinstrahlung, Hitze noch Nässe aus.

B) Fell-/Mähnenprobe: - BEUTEL -

1. Verwenden Sie für die Einsendung der Fell- bzw. Mähnenprobe einen sauberen Plastikbeutel (z.B. Gefrierbeutel).
2. Wir empfehlen die Einsendung mittels der „Melio.serv V-Box“.
3. Nehmen Sie dem zu untersuchenden Tier (Hund /Katze) eine Fellprobe **max.** in der Größe einer 2-Euro Münze *vorsichtig* ab.
4. Für die Beprobung eines Pferdes nehmen Sie einen ca. bleistiftdicken Untermähnenstrang ab.
5. Achten Sie darauf, das Tier nicht zu verletzen. Reißen Sie das Fell bzw. die Mähnenhaare nicht aus, sondern schneiden Sie die Probe vorsichtig mit einer Schere ab.
6. Achten Sie darauf, dass die Probe nicht verunreinigt wird.
7. Geben Sie die Probe direkt nach der Abnahme in den vorgesehenen, sauberen Probenbeutel und verschließen Sie diesen sorgfältig. Versiegeln Sie diesen anschließend (ReSeal).
8. Beschriften Sie den Beutel mit: Name des Tieres, Geburtsdatum und Geschlecht des Tieres sowie dem Datum der Probenabnahme.
9. Machen Sie die notwendigen Angaben auf den beiliegenden Formularen.

Zum Schluss alle Inhalte und Dokumente zusammen **mit** der Probe zurück in die „V-Box“. Box danach sorgfältig **nur noch:** verschließen. Versandaufkleber auf die Box. Ausreichend frankieren und ab die Post zurück an Melio.serv VET.

... und die Dinge sind klar.
Moderne Welt. Innovation erleben.

Schritt für Schritt für Ihr Tier.
Schmerz- und stressfrei.

